

HEMOSPRAY

Hemostático Endoscópico



Descripción

- Polvo hemostático mineral, desarrollado para la hemostasia endoscópica. El polvo se administra mediante el uso de un sistema de administración alimentado con dióxido de carbono, mediante un catéter insertado a través del canal de trabajo de un endoscopio que proporciona acceso al sitio de la hemorragia.

Indicaciones

- Este dispositivo se usa para hemostasia de las hemorragias gastrointestinales no varicosas

Especificaciones técnicas

Canal de trabajo

- 2.8 mm para HEMO 7
- 3.7 mm para HEMO 10

Longitud del catéter

- 220 cm

Contraindicaciones

- Aquellas específicas de los procedimientos endoscópicos primarios que se realizan para obtener acceso al sitio objetivo deseado. También está

contraindicado en pacientes con fistulas gastrointestinales, que se sospecha que tiene una perforación gastrointestinal o que tienen un alto riesgo de perforación gastrointestinal durante el procedimiento endoscópico.

Complicaciones posibles

- Complicaciones asociadas con la endoscopia gastrointestinal. El uso de Hemospray en presencia de obstrucción intestinal o una anastomosis puede generar un riesgo de lesión debido a excesiva distensión.
- Hemospray puede ocluir conductos y orificios que se comunican al lumen intestinal principal.

Fabricante

- Wilson-Cook Medical Inc

Almacenamiento

- Lugar seco y protegido de temperaturas extremas

Presentación

- Sobre con una unidad

Esterilización

- Desechable, único uso

Disposición final

- Residuo contaminado peligroso

Registro sanitario

- INVIMA 2021DM-0022831

Clasificación de riesgo

- Riesgo III

Referencias comercializadas

Referencia	Referencia de producto	Tamaño catéter Fr	Longitud del catéter cm	Canal de accesorios mínimo mm
G56572	HEMO-7*	7	220	2,8
G21049	HEMO-10*	10	220	3,7